

安心サービス「安否確認端末」設置手順書

電話機のもジュラーケーブルを抜きます。

抜いたもジュラーケーブルを在宅端末の電話回線へ差し込みます。

在宅端末からのもジュラーケーブルを電話機の電話回線へ差し込みます。

端末のACプラグをACコンセントに挿入します。

電源を入れると、表示窓の表示が点滅し、1 or 2 or 3 を表示します。

- 1…トーン回線(光回線、ケーブルプラス回線など含む)
 - 2…ダイヤル回線 20 pps
 - 3…ダイヤル回線 10 pps
 - 4…回線が接続できなかった場合(再度、もジュラーケーブルを指しなおしてください)
- セットランプが点灯している場合は、セット/リセットボタンを押してセットランプを消してから、再度、ACコンセントに挿入してください。


セット/リセットスイッチを押します。

セットランプが約2分間点滅した後、セット状態(見守り開始)になります。

接続は完了です。

端末、センサーを設置してください。

センサーは、居間、台所など日常生活されている場所の床から1mの位置に設置してください。
(転倒時でもセンサーが反応しないように、また、ペットなどに反応しないようにするためです。)
太陽の光、車のヘッドライトなどが直接あたらないように、また、エアコンの下には設置しないでください。

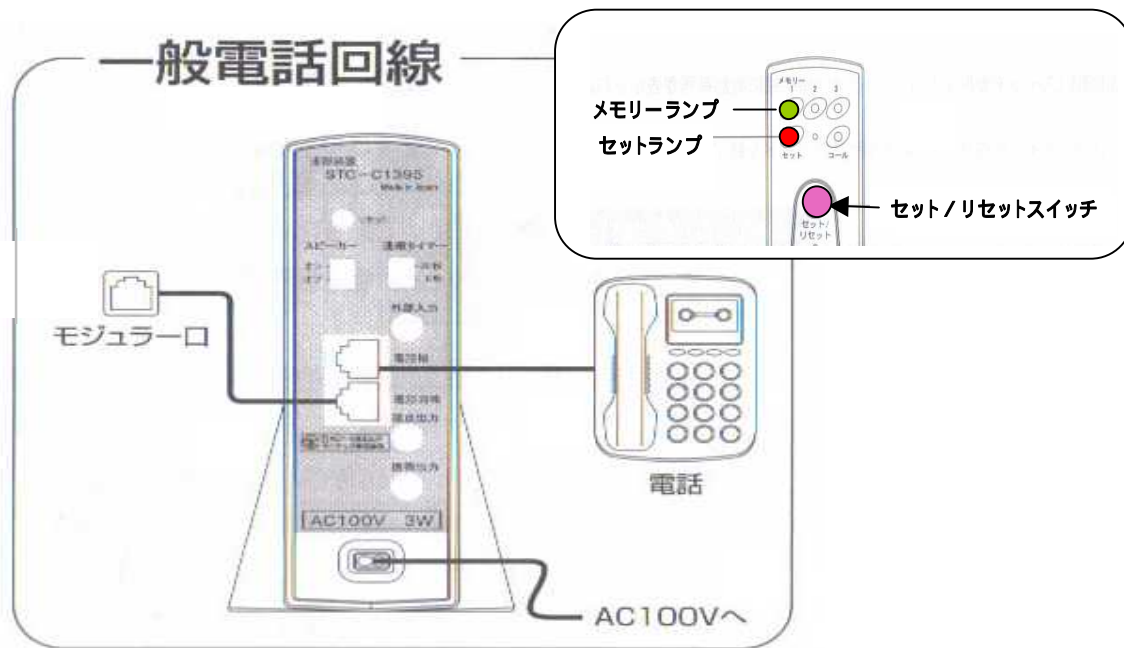

お問い合わせは

安心サービスセンター
(株)ライフサポートジャパン

TEL: 0584 - 64 - 7133

〒503-0113 岐阜県安八郡安八町北今ヶ淵455番地の7